




cerascreen®

hsCRP Test

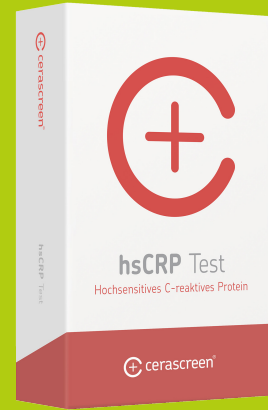

### Prävention von Arteriosklerose + Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Entzündungen im Körper? Der cerascreen® hsCRP Test kann auf ein gesteigertes Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Dazu misst der Test die Konzentration des hochsensitiven C-reaktiven Proteins (hsCRP).

Haben Sie ein potentiell erhöhtes Risiko festgestellt, können Sie gezielt durch einen gesunden Lebensstil gegensteuern und sich frühzeitig ärztlich untersuchen lassen.

Hinweis: Der cerascreen® hsCRP Test ersetzt keine ärztliche Beratung oder Diagnose. Bitte sprechen Sie mit Ihren zuständigen Ärzt\*innen, wenn Sie auffällige Ergebnisse erhalten und bevor Sie medizinische Maßnahmen treffen.

- + Blutprobe zuhause nehmen: Ein Piks in den Finger genügt
- + professionelle Auswertung im medizinischen Fachlabor
- + Empfehlungen zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- + nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
- + Ergebnisse innerhalb von wenigen Tagen nach Probeneingang im Labor
- + inkl. 15-minütige Telefonberatung für weitere Fragen oder Ernährungsberatung

### Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



**Testen**, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



**Wissen**, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



**Handeln**, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



### Wie funktioniert der Test?

#### 1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

#### 2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

#### 3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

## hsCRP Test

### Der hsCRP Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den hsCRP Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den hsCRP Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der hsCRP Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu da, Krankheiten zu diagnostizieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum hsCRP Test:  
<https://www.cerascreen.at/products/hs-crp-test>



PZN 5638434

Dieses Kit kann nur innerhalb Österreichs  
kostenlos zurückgesendet werden.

